

OP-TILBEHØR & LEJRING

AV! FOREBYG SKADER VED LØFT



ELEKTRISK HJÆLPEMIDDEL

BEN- OG ARMLØFTER



Der medfølger: Løftestænger til enkelt eller bilateralt løft og 320 mm forhøjer til f.eks. løft i beach chair.

Artikel nr. 2009-01

- » Ergonomisk håndtag
- » Maks. belastning i ydrestilling (50 cm fra center) er ca. 100 kg (1000N)
- » Kompakt design

REGLER OM MANUEL HÅNDTERING

Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er bla. teknisk udstyr der skal anvendes, omsorg for patienten, antiseptiske regler og patientsikkerhed.

Et område der har været fokus på, er løft og arbejdsmiljø. Påbud fra Arbejdstilsynet ses ofte i forhold til løft, hvor patientens arm eller ben skal afvaskes sterilt, når der ikke anvendes hjælpemiddel.



Personalet står ofte i uhensigtsmæssige stillinger, med armen løftet og med skæv ryg. Dette øger belastningen væsentligt.

» Arbejde med manuel håndtering skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

» Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger, der imødegår risikoen.

» Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler, når det er muligt og hensigtsmæssigt og altid, når den manuelle håndtering indebærer sundhedsfare.

» Unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænser skal overholdes.

Kilde: Arbejdstilsynet, At-vejledning D.3.1, September 2005, Erstatte 2. udgave oktober 2004

FORVÆRRENDE FAKTORER

» Løftet kan foregå skævt/asymmetrisk i forhold til kroppen.

» Ryggen vrides, bøjes forover eller til siden, eller især hvis ryggen foroverbøjes og vrides samtidig. Belastningen vil stige med graden af foroverbøjning, vridning og varigheden, samt når der skal rækkes ud efter byrden.

» Armene løftes, især hvis hænderne løftes til eller over skulderhøjde.

» Der løftes fra siden eller med én hånd. Ryggen belastes herved ca. dobbelt så meget som ved løft midt foran kroppen med to hænder.



Patient på 65 kg: En arm 3,3 kg, Et ben 10,5 kg

Patient på 90 kg: En arm 4,5 kg. Et ben 14,5 kg

Patient på 120 kg: En arm 6 kg. Et ben 19,2 kg

ENGANGSSTROPPER TIL BEN- OG ARMLØFTER



Strop 2006-60



Velcro coin 2006-65



Løft af arm ved beach chair
2006-60



Løft af arm i rygleje
2006-60



Håndkirurgi
2006-60 + 2006-65



Forfodsløft
2006-60 + 2006-65



Bilateral forfodsløft
2006-60 + 2006-65

ENGANGSSTROPPER TIL BEN- OG ARMLØFTER



Strop
2006-50



Knækirurgi
2006-50



Fodkirurgi
2006-50



Bilateral løft ved ankel
2006-50



Fodkirurgi, sideleje
2006-50



Hofte eller knæ
2006-50



Bugleje
2006-50



Bugleje
2006-70-1



Hånd eller arm kirurgi
2006-50

TILBEHØR: STROP 2006-50



Artikel nr.: 2006-50

- » Bruges til løft af ben, enkelt eller bilateralt
- » Ved løft af arm
- » Ryg, bug eller sideleje
- » Max. vægt 125 kg
- » Enkel og hygiejnisk i brug

Strop 2006-50 kan bruges til

Knækirurgi

Fodkirurgi

Bilateral løft ved ankel

Fodkirurgi, sideleje

Hofte eller knæ

Bugleje

Hånd eller arm kirurgi

Stropperne er til éngangsbrug




TILBEHØR: STROP 2006-60



Artikel nr.: 2006-60

- » Bruges ved løft af arm, hånd eller forfod
- » Enkelt eller bilateralt løft
- » Ryg, beach chair eller sideleje
- » Max. vægt 30 kg
- » Kan bruges med velcro coin (2006-65)

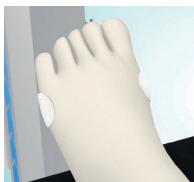

Artikel nr.: Velcro coin 2006-65

Strop 2006-60 kan bruges til

Løft af arm ved beach chair

Løft af arm i rygleje

Håndkirurgi

Forfodsløft

Bilateral forfodsløft

Stropperne er til éngangsbrug



TILBEHØR: STROP 2006-70-1



Artikel nr.: 2006-70-1 / Stropsæt: 2006-70

- » Bruges til løft af ben i bugleje
- » Eventuelt sammen med 2006-50
- » Kan også bruges til adipøse ben
- » Enkel og hygiejnisk i brug
- » Stropsæt: 2006-70
1 stk. 2006-70-1 + 1 stk. 2006-60

Strop 2006-70-1 kan bruges til

Adipøse ben

Benløft i bugleje

Alle vores løftestropper er certificerede i henhold til
Oeko-Tex standard 100




Stropperne er til éngangsbrug



OP-TILBEHØR & LEJRING

KONTAKT OS

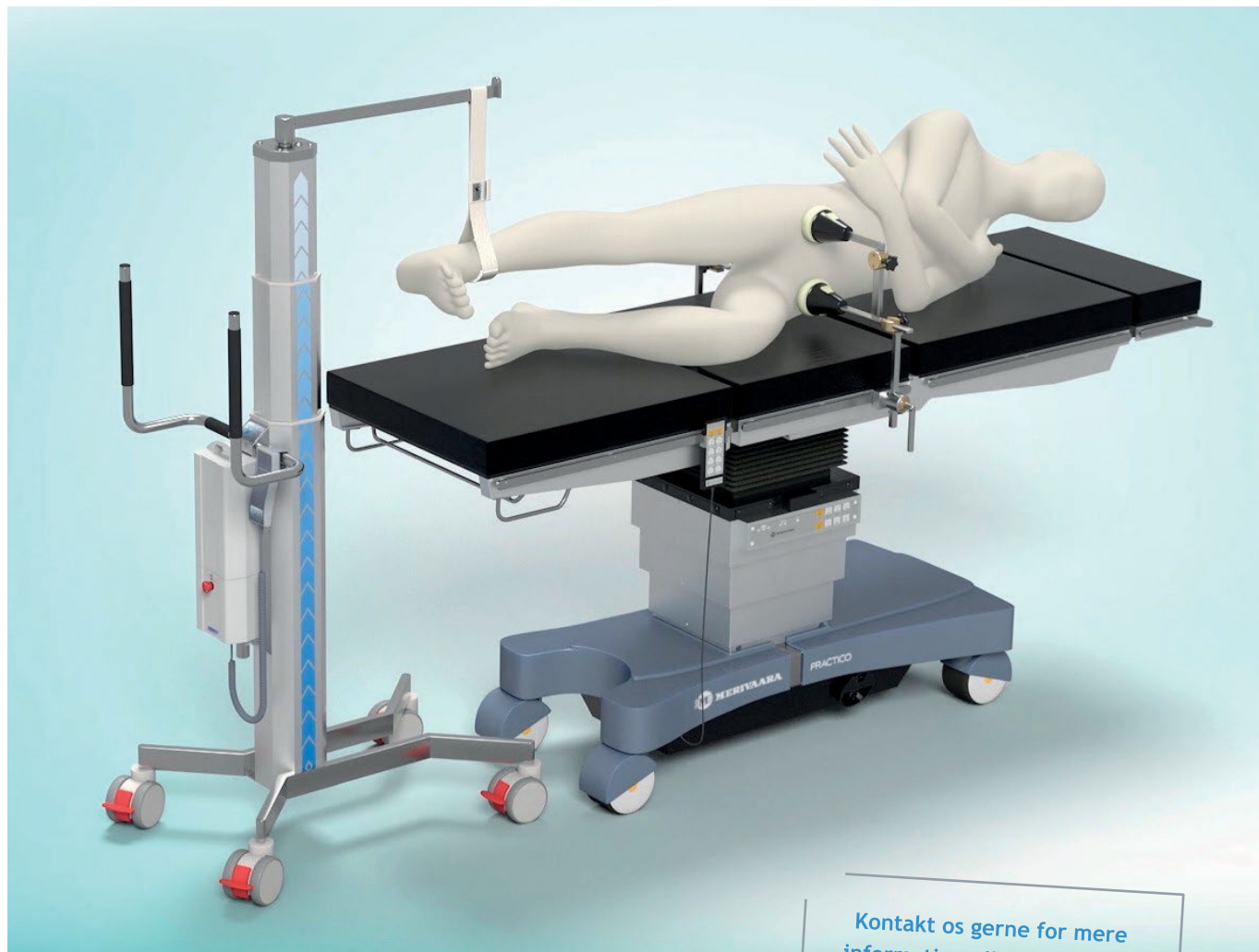

Kontakt os gerne for mere
information eller afprøvning
på din afdeling

VED SPØRGSMÅL TIL PRODUKTER, LEJRINGER
ELLER LØFT, SÅ KONTAKT OS PÅ GERNE PÅ
TELEFON ELLER MAIL.

Vi har i mere end 20 år udviklet, fremstillet, distribueret
og forhandlet medicotekniske artikler og viden. Vi er
specialister indenfor udvalgte hovedområder.