

SURGISTAIN®

Vare nr.: 345B

Pakningsstørrelse: 4 x 4 liter

Fjerner Rust og pletter fra kirurgiske instrumenter fremstillet af rustfrit stål. Rutinemæssig brug vil øge levetiden og effektiviteten af instrumenterne.

Surgistain® er en sikker, effektiv og hurtigt virkende løsning for afrensning af kirurgiske instrumenter fremstillet i rustfrit stål, bakker og riste. Produktet fjerner rust, pletter, kalk og de mineralforekomster man ofte støder på i genbehandlingsprocessen. Produktet medvirker også til at løsne led og bokslåse på instrumenterne.

Det anbefales, at man rutinemæssigt afrenser instrumenterne ved af hjælp Surgistain®, f.eks. hver anden måned eller ved behov. Regelmæssig brug vil øge levetiden og effektiviteten af instrumenter, bakker og riste, og samtidig sænke omkostningerne til udskiftning og indkøb.

Surgistain® er en mild opløsning af syre, som er sikker at bruge, selv på sarte instrumenter samt på de forskellige tilbehørsdele til endoskoper og mikroskoper samt oftalmologiske instrumenter. Surgistain® anbefales ikke til brug på forkromede eller forsvædede instrumenter eller på aluminium.




SURGISTAIN®

Egenskaber:

- » Sikker, effektiv og hurtigt virkende opløsning, der fjerner rust, pletter, kalk og mineralforekomster på kirurgiske instrumenter fremstillet af rustfrit stål.
- » Perfekt til brug på rustfri stål bakker og riste.
- » Kan anvendes i ultralyd maskiner (leverandøren af ultralyds maskinen skal bekræfte brugen).
- » Rutinemæssig brug vil øge levetid og effektivitet af kirurgiske instrumenter, og løsner led og bokslåse.
- » Kan anvendes i alle sterilcentraler og præparationer.
- » Ikke-aerosol – miljø sikker anvendelse

Brugsanvisning til kirurgiske instrumenter:

1. Tilsæt 1 del Surgistain® til 7 dele varmt vand (50°-80° C). Afrensningskar kan med fordel anvendes. Alternativt anvendes en beholder i ikke porøst materiale.
2. Anbring instrumenterne i Surgistain® opløsningen i 15 minutter. Hvis der er meget rust og / eller pletter på instrumenterne, kan man lade dem ligge i opløsningen i længere tid (30 min.).
3. Fjern instrumenterne fra Surgistain® opløsningen, og skyl grundigt under rindende vand.

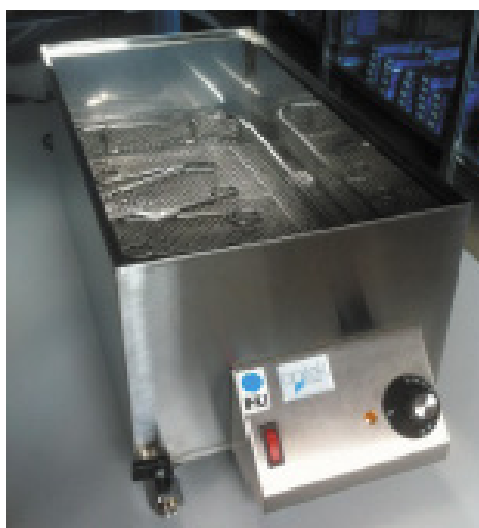

Kontakt os gerne for mere information eller afprøvning på din afdeling