

LUK OP, LÆS MERE, OG LAD OS INSPIRERE DIG


## HIP FIX™ - SERVICE

Vidste du, at alle Hip Fix™ - brugsanvisninger kan hentes på vores hjemmeside?

Se mere her:  
[www.opitek/hipfix](http://www.opitek/hipfix)


Kontakt os gerne for mere  
information eller undervisning  
på din afdeling

39 66 16 44 / [info@opitek.dk](mailto:info@opitek.dk)

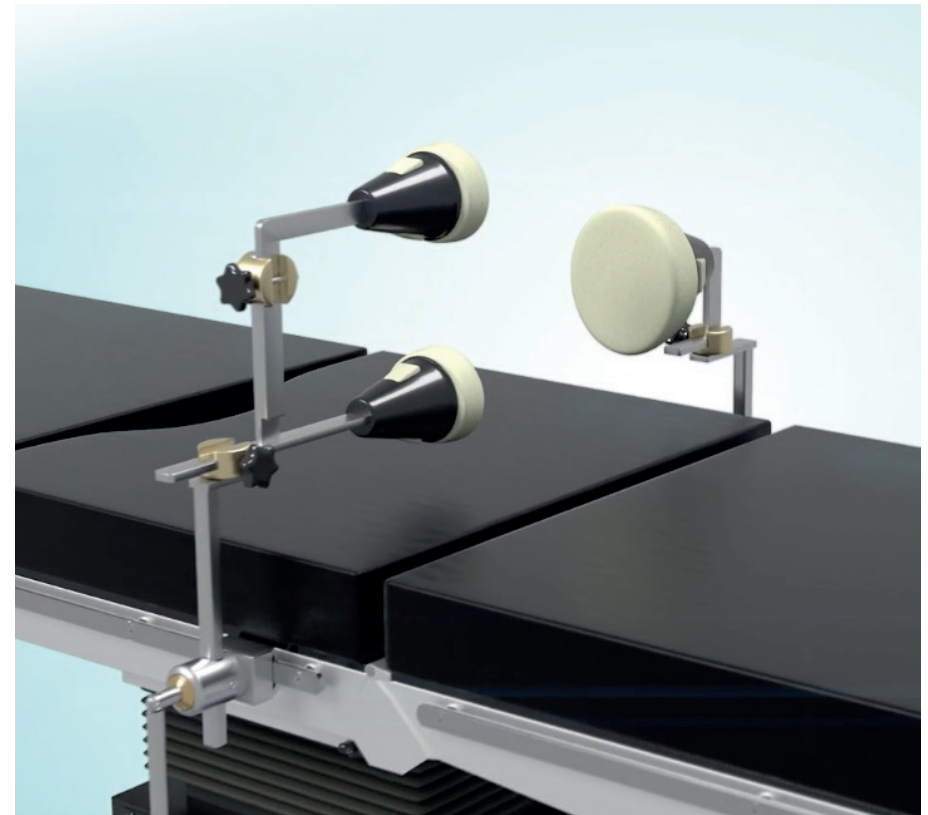

Trænger afdelingens Hip Fix™  
til gennemgang og servicering?

## HIP FIX™ - MODELLER:

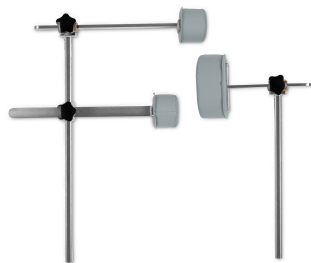

1900-01



1915-200



2000-182



2015-200



Radialklods: 10-305-P

## OPITEK TILBYDER GENNEMGANG OG SERVICERING AF HIP FIX™ - UDSTYR OG RADIALKLODSE

Hip Fix™ gennemgås for slitage på alle arbejdende dele, skruer efterspændes, og radialklodser skilles ad, renses, smøres og justeres.

Alle dele renses for evt. klæberester.

Der påsættes reservedelsnummer på de enkelte komponenter, og model-serienummer tildeles på Hip Fix™, der ikke allerede har dette.

Opitek udarbejder tilbud på de dele, vi vurderer, der trænger til udskiftning og derefter vurderer kunden, om udskiftningen skal foretages.

Fast pris for serviceeftersyn: 495 kr. pr. Hip Fix™.

Derudover kommer prisen på evt. reservedele.

Hvis I ønsker det, kan Hip Fix™ returneres i en karton med skumindlæg, der passer til modellen.

Skumindlæg koster 395 kr. stk.

