

KUFFERTEN INDEHOLDER

Skruetrækker til montering af skæreplader

Skæremaskine med låse-mekanisme. Tænd på hvid knap, og lås efter brug.

Eksplorations- eller UL-gel til finger-beskyttelsespladen

Finger-beskyttelsesplade

Skæreplader:

Blå til bløde metaller som fx guld, sølv, alu.

Rød til hårde metaller som titanium, rustfrit stål, jern.




Batterilåg




1




Skrue skruen ud, isæt skæreplade, og skru fast.

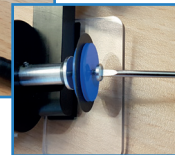


2

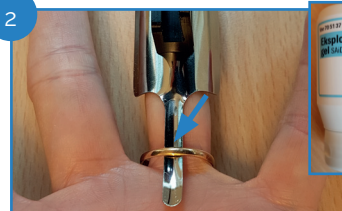

Smør rigeligt med gel på finger-beskyttelsespladen, som placeres under ringen. Savklingen skal bruge gel til at køre i.

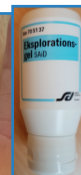

3

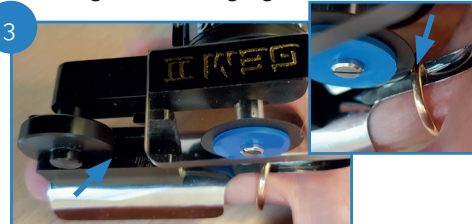

Placer hjulet i rillen og skærepladen mod ringen. Aktiver motoren på hvid knap, og skær.