

SURGISTAIN®

Vare nr.: 345B

Pakningsstørrelse: 4 x 4 liter

Fjerner Rust og pletter fra kirurgiske instrumenter fremstillet af rustfrit stål. Rutinemæssig brug vil øge levetiden og effektiviteten af instrumenterne.

Surgistain® er en sikker, effektiv og hurtigt virkende løsning for afrensning af kirurgiske instrumenter fremstillet i rustfrit stål, bakker og riste. Produktet fjerner rust, pletter, kalk og de mineralforekomster man ofte støder på i genbehandlingsprocessen. Produktet medvirker også til at løsne led og bokslåse på instrumenterne.

Det anbefales, at man rutinemæssigt afrenser instrumenterne ved af hjælp Surgistain®, f.eks. hver anden måned eller ved behov. Regelmæssig brug vil øge levetiden og effektiviteten af instrumenter, bakker og riste, og samtidig sænke omkostningerne til udskiftning og indkøb.

Surgistain® er en mild opløsning af syre, som er sikker at bruge, selv på sarte instrumenter samt på de forskellige tilbehørsdele til endoskoper og mikroskoper samt oftalmologiske instrumenter. Surgistain® anbefales ikke til brug på forkromede eller forsvædede instrumenter eller på aluminium.



SURGISTAIN®

Egenskaber:

- » Sikker, effektiv og hurtigt virkende opløsning, der fjerner rust, pletter, kalk og mineralforekomster på kirurgiske instrumenter fremstillet af rustfrit stål.
- » Perfekt til brug på rustfri stål bakker og riste.
- » Kan anvendes i ultralyd maskiner (leverandøren af ultralyds maskinen skal bekræfte brugen).
- » Rutinemæssig brug vil øge levetid og effektivitet af kirurgiske instrumenter, og løsner led og bokslåse.
- » Kan anvendes i alle sterilcentraler og præparationer.
- » Ikke-aerosol – miljø sikker anvendelse

Brugsanvisning til kirurgiske instrumenter:

1. Tilsæt 1 del Surgistain® til 7 dele varmt vand (50°-80° C). Afrensingskar kan med fordel anvendes. Alternativt anvendes en beholder i ikke porøst materiale.
2. Anbring instrumenterne i Surgistain® opløsningen i 15 minutter. Hvis der er meget rust og / eller pletter på instrumenterne, kan man lade dem ligge i opløsningen i længere tid (30 min.).
3. Fjern instrumenterne fra Surgistain® opløsningen, og skyl grundigt under rindende vand for at neutralisere opløsningen.
4. Gennemgå hvert enkelt instrument. Brug evt. børste, hvis der er rester tilbage.

Hvis instrumentet ikke er helt rent, kan processen gentages.

Instrumenter med synlig gennemtæring og sprækkekorrosion bør kasseres.
5. Alle godkendte instrumenter skal derefter igennem den vanlige vaskeproces.
6. Alle instrumenter med bevægelige dele skal olieres, da instrumenterne bliver meget udtørret af afrensningen.
7. Instrumenterne kan derefter sættes i cirkulation igen.
8. Efter brug tømmes afrensingskarret og skylles grundigt med rent vand.

Kontakt os gerne for mere information eller afprøvning på din afdeling